

NYE testkit for prøvetakning SARS-CoV-2 (COVID-19) og differensialdiagnostikk

UTSTYR PR. PASIENT

1x KIT med 1x medium og 2x pensler



Tykk til hals



Tynn til nasopharynx



BEGGE PENSLER SKAL
PLASSERES I SAMME GLASS

OBS


Beskytteshylse rundt
tynn pensel **MÅ** fjernes
før prøvetakning

PRØVETAKNING

HALS

OBS: TYKK PENSEL

Den **TYKKE** penselen
strykes og roteres
over bakre svelgvegg
og tonsiller
(mandlene)

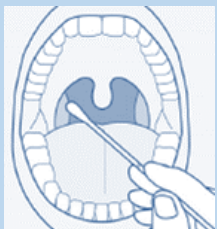

REKVISISJONEN

MÅ inneholde et direkte telefonnummer til rekvirent
eller kommuneoverlege, slik at positive prøvesvar
kan ringes ut også utenfor vanlig arbeidstid!


DIFFERENSIALDIAGNOSTIKK

Dersom differensialdiagnostikk er viktig, eks.
sykehjemspasienter el. lign., **MÅ** det fremkomme
KLART på rekvisisjonen (under kliniske opplysninger)
at dette ønskes. Vi bruker samme medium som
allerede er tilsendt til denne diagnostikken (IKKE
nødvendig med ekstra prøveglass).


NASOPHARYNX

OBS: TYNN PENSEL


Den **tynne** penselen
føres **HELT** bak til
naso-pharynx

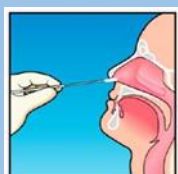

La penselen ligge i
minimum 10 sekunder

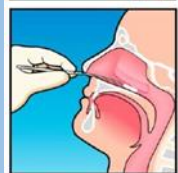

Penselen roteres 360°,
før den trekkes ut

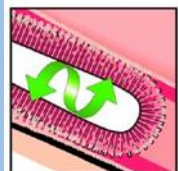

Plasser penselen i
mediet og brekk av
pinnen i brekkpunktet



Bestilling av nytt materiell

Vanlig bestillingslinje er nå operativ.

ARTIKKELNUMMER: 202007

NAVN: Rør, UTM-medium, m/pensel til PCR-analyse

IKKE BESTILL MER ENN 1.5% av innbyggertallet /
listestørrelsen på legekantoret.

Før innsending til laboratoriet

Prøveglassene må vaskes/tørkes med
desinfiserende (eks. sprit) før navneetiketten
settes på. Påse at **korken er tilstrekkelig
festet** og at **pasientinfo er synlig** og ikke er
vasket bort. Sendes ellers etter normale
rutiner til NLSH. Ytre emballasje skal ikke
merkes med Corona-prøver (skaper unødvendig
frykt hos posten).



NORDLANDSSYKEHUSET
NORDLÁNDÁ SKIPIJVÍESSO



12.05.2020